



エタノールクロス


アルコール含浸シート




医療施設用

手軽にふき取り除菌清掃


ベッドの柵やテーブル

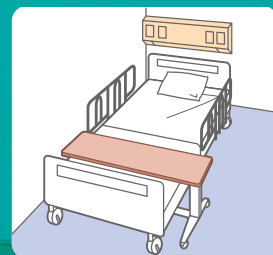

車いすの肘掛けや手押しハンドル

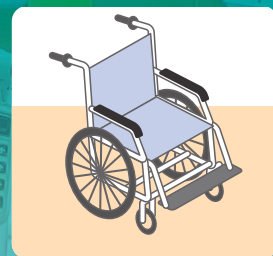


電気スイッチ

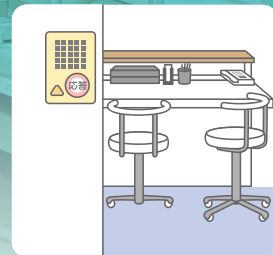

医療従事者、患者、入居者の身のまわりに。
気になる汚れや菌・ウイルスをサッと拭き取り除去*。



80枚入り
シート寸法: 14cm×20cm/枚

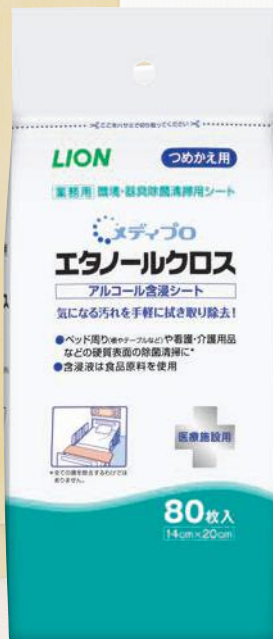

つめかえ用

商品特長

- 1 人の手が触れるドアノブ、ベッドの柵、車いすなど、施設内の気になる汚れをサッと拭いて除菌清掃できます。
- 2 80%エタノール含浸製品と比べ、アルコール臭の広がりが少ないため、患者様や入居者様の近くでも手軽に使えます。
- 3 菌とウイルスを拭き取り除去*。血液汚れにも高い洗浄力を発揮し、しっかり拭き取れます。
- 4 含浸液は食品原料(食品添加物)と精製水を含浸しています。

*すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

ユーザー様からの声

ベッド・手すり・ドアノブ・トイレ清掃の拭き取り作業として使用。速乾性がありクロスの綿落ちもなくて良かった。(介護施設A様)

床頭台・ベッドレールなどの軽い汚れは簡単に落ちた。1枚の大きさ、生地の厚みが丁度よく使いやすかった。(介護施設B様)

手すりを拭く際、手軽に使用できて良かった。(介護施設C様)

ケアのタイミングでテーブルや椅子などに使用したが、取り扱いが簡単で手早く使用できるところが魅力的だった。(介護施設D様)



エタノールクロス

アルコール含浸シート



エタノールを不織布に含浸した施設環境・器具の清掃用ウエットシートです。(人体には使えません。)


洗浄性能

洗浄力試験

タンパク変性が少なく、
血液汚れに対する洗浄性が高い



未洗浄

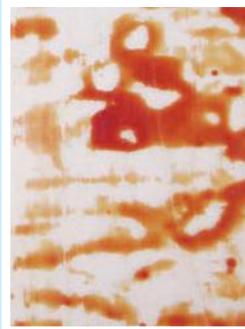

エタノール80%含浸シート



メディプロエタノールクロス

汚垢：ヒツジ血液をPP板に塗布後、乾燥したものをモデル汚垢板とした。洗浄：シート2枚で拭き取り後自然乾燥



本体

つめかえ用

● ウイルス除去試験*

	ウイルスA (非エンペローブタイプ)		ウイルスB (エンペローブタイプ)	
	ウイルス数 (TCID50/試験担体)	除去効果(%)	ウイルス数 (TCID50/試験担体)	除去効果(%)
乾燥直後	1.5×10^6		2.4×10^7	
エタノールクロスで拭き取り後	3.3×10^3	99	2.4×10^4	99.9

試験機関：(一財)北里環境科学センター 北環発 2016.0021号 (2016年8月10日発行) 北生発 2016.0134号 (2016年8月3日発行)
 <試験方法> 各種菌、ウイルス液を接種、乾燥させたプレートを試験品にて5往復拭き取り後、残存菌、ウイルスを回収し、測定した。
 ※除去効果：(a-b)a×100 a:乾燥直後の菌数、ウイルス数 b:試験資料で拭き取り後の菌数、ウイルス数
 ※すべての菌・ウイルスを除去できるわけではありません。

● 除菌試験*

	グラム陰性桿菌A		グラム陽性球菌B	
	菌数 (cfu/試験担体)	除去効果(%)	菌数 (cfu/試験担体)	除去効果(%)
乾燥直後	2.0×10^7		9.4×10^6	
エタノールクロスで拭き取り後	2.0×10^1	99.9999	2.4×10^4	99

用 途

●人の手が触れるドアノブ、手すり、ベッドの柵、蛇口などの施設内における硬質表面の除菌清掃。●車いす、杖などの看護・介護用品の除菌清掃。

使えないもの

白木、樹脂(アクリル、ABS)、金属(銅、真鍮などの銅を含む合金)。次のものは目立たない部分で試してからお使いください。変色、シミなどの原因となることがあります。皮製品、ゴム材、木材、大理石などの石材、ワックスコートや塗装面。

■ 梱 内 容

品 名	容量	梱入数	寸 法(mm)		重 量(kg)		個 装 材 質	JANコード
			個 装	外 装	個 装	外 装		
メディプロ エタノールクロス 本体	80枚	12	幅 105 高さ 178 奥行 105	幅 433 高さ 196 奥行 326	0.4	5.3	ラベル : 紙 ボトル : PP キャップ : PE 中フィルム : PE、M 外装フィルム : PP	4903301253600
メディプロ エタノールクロス 詰替	80枚	20	幅 100 高さ 280 奥行 70	幅 398 高さ 171 奥行 301	0.3	6.9	フィルム : PP、PET	4903301253617

■お問合せ先は

ライオンハイジーン株式会社